

Die Erwärmung sowie die Anwendung darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

### Folgende Hinweise gelten für die Erwärmung in der Mikrowelle und im Backofen:

- Lassen Sie das Rapskissen bei der Erwärmung niemals unbeaufsichtigt, da es sich entzünden könnte.
- Vor jeder erneuten Erwärmung muss das Rapskissen auf Raumtemperatur abgekühlt sein.
- Bei der Erwärmung darf kein Wasser zugegeben werden.
- Eine vorhandene Grillfunktion ist stets abzuschalten.
- Erwärmen Sie das Kissen gemäß den Temperatur- und Zeitangaben auf dem eingenähten Produktetikett.

### Erwärmung in der Mikrowelle:



Das Rapskissen flach auf einen sauberen, mikrowellengeeigneten Teller legen und erwärmen bei

**max. 160 Watt für max. 1 Minute.**

Die tatsächliche Leistung kann bei verschiedenen Mikrowellen-Modellen trotz identischer Leistungsangabe unterschiedlich ausfallen. Achten Sie darauf, dass sich der Teller in der Mikrowelle dreht.

Das Rapskissen herausnehmen, gut durchschütteln und **vor Anwendung Temperatur prüfen**, wie oben beschrieben.

### Erwärmen im Backofen:

Keine Erwärmung in einem Gasbackofen!



Das Rapskissen flach auf einen kalten, feuerfesten Teller legen und im **vorgeheizten Backofen bei 60° C**

**max. 8 Minuten** erwärmen.

Das Rapskissen herausnehmen, gut durchschütteln und vor Anwendung Temperatur prüfen, wie oben beschrieben.



### Produktinformationen

<b>REF</b>	Kissengröße K
Maße:	145 x 110 mm +/- 5mm
Gesamtgewicht:	140 g +/- 10 g
Füllung:	Rapskörner
Stoff:	100% Baumwolle Öko-Text Standard 100

### Hinweise zur Aufbewahrung und Entsorgung

Das Rapskissen muss trocken und luftig gelagert werden. Um Fäulnis- und Schimmelbildung zu vermeiden, nicht in Plastik aufbewahren sowie folgende Hinweise beachten:



nicht waschen



nicht bleichen



nicht im Trockner trocknen



nicht bügeln



nicht chemisch reinigen



Achtung! Entsorgen Sie das Kissen im normalen Hausmüll, wenn es Beschädigungen oder Verschmutzungen aufweist.

### Erläuterung der Symbole



Hersteller



Kissengröße



Gebrauchsanweisung beachten



Warnhinweis beachten



vor Sonnenlicht aufbewahren  
geschützt aufbewahren



trocken



Mikrowelle



Backofen



Medizinprodukt



Conformité Européenne

Fehmann  
*Rapskissen*  
Das Original

### Direktverkauf und Versand:

**Astrid Lange-Hallmann**

Ratssollweg 19  
23769 Fehmann/OT Petersdorf

Tel.: 04372 - 1269

Bestellungen sowie die aktuellen

Öffnungszeiten auf [www.rapskissen.de](http://www.rapskissen.de)



Informatives und Neuigkeiten aus der Nähwerkstatt finden Sie auf Facebook und Instagram.

REV 03

*Fehmann  
Rapskissen*



Unser  
*Kleinstes,*  
das Freude macht!



Anwendbar bei Babys ab 3 Monaten  
und einem Körpergewicht von 5 kg.

*Gebrauchsanweisung*

## Kleine Manufaktur – Große Auswahl

### Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein **Original Fehmarn Rapskissen** entschieden haben. Das Rapskissen „Unser Kleinstes“ ist ein Medizinprodukt zum privaten Gebrauch zur Wärmeanwendung bei Babys ab einem Alter von mindestens 3 Monaten und einem Mindestgewicht von 5 kg. Es ist zur vorübergehenden Anwendung ohne direkten Hautkontakt bestimmt. Die Wärmebehandlung darf maximal 15 Minuten dauern, danach muss eine einstündige Pause erfolgen.

Die Anwendung des Medizinprodukts ist für eine maximale Nutzungsdauer von 3 Jahren vorgesehen oder bis das Medizinprodukt beschädigt und/oder verschmutzt ist.



**Das Rapskissen ist kein Spielzeug und darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.**

Damit Sie lange Freude am Rapskissen haben, lesen Sie vor der ersten Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Hinweise zur bestimmungsgemäßen Anwendung und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf. Sollten

Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch unbedingt die Gebrauchsanweisung mit.



## Wirkungsweise

Der Raps von Fehmarn ist die ideale Füllung für unsere Kissen, weil Rapskörner mit 40% Ölgehalt die Temperatur über lange Zeit speichern können. Durch die kleine Körnung der Rapssaat schmiegt sich das Kissen besonders gut am Körper an.

**Unser Kleinstes** Fehmarn Rapskissen ist beim Erwärmen nahezu geruchlos, einfach in der Handhabung und mehrfach zu verwenden.

### Unsere Empfehlungen für Sie zur Wärmeanwendung:

- Bei Bauchweh
- Bei Blähungen
- Bei Unwohlsein
- Bei Nackenverspannungen
- Zur Beruhigung
- Zur Erwärmung von kalten Händen und Füßen
- Zur Vorwärmung des Bettchens



### Sichere Anwendung der Rapskissen

#### 1. Allergien

Das Rapskissen beinhaltet Raps und kann zu allergischen Reaktionen führen!

#### 2. Defekte, verschmutzte Rapskissen

Prüfen Sie vor jeder Anwendung das Rapskissen auf Beschädigungen und/oder Verschmutzungen. Achten Sie vor jeder Nutzung auf unversehrte Nähte, da beim Verschlucken von losen Rapskörnern Erstickungsgefahr droht. Es darf keine

Reparatur am Rapskissen durchgeführt werden. Sollte es verschmutzt und/oder beschädigt sein, ist es über den Hausmüll zu entsorgen.

#### 3. Für die Anwendung bei Babys

Ein großes Risiko für Ihr Baby ist eine Überhitzung. Babys können ihre Körpertemperatur nicht regulieren. Achten Sie immer darauf, dass Ihr Baby nicht überhitzt. Führen Sie eine Nackenprüfung durch, um festzustellen, ob Schweiß vorhanden ist. Sollten Sie Schweiß feststellen, ist Ihrem Kind zu warm und Sie müssen die Behandlung abbrechen.

Die **Wärmeanwendung** darf **maximal 15 min.** dauern. Danach muss eine einstündige Pause folgen.

Da Babys noch keine ausgeprägte Atemmuskulatur haben, stellt ein **Gewicht** auf dem Brustkorb eine **gefährliche Belastung** dar. Das Rapskissen darf weder auf dem Brustkorb noch auf oder vor dem Gesicht des Babys platziert werden, da Erstickung droht. Um die Atmung jederzeit kontrollieren zu können, darf das Rapskissen **nur unter Aufsicht** eines Erwachsenen angewendet werden.

Eine Anwendung bei immungeschwächten Babys ist strengstens untersagt. Bei Nebenwirkung oder Gesundheitsverschlechterung kontaktieren Sie bitte Ihren Hausarzt.

Sollte es zu schwerwiegenden Vorkommnissen im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt kommen, informieren Sie bitte die zuständige Landesbehörde und uns.

### Vor jeder Anwendung ist die Temperatur des Rapskissens mit einem handelsüblichen Fieberthermometer zu prüfen:

Nach der Erwärmung ist das Rapskissen gut durchzuschütteln, um die Temperatur gleichmäßig zu verteilen. Legen Sie das Fieberthermometer in die Mitte des zusammengeklappten Rapskissens und warten Sie, bis die maximale Temperatur erreicht und angezeigt wird. Sie darf 40°C nicht übersteigen. Nun können Sie das Rapskissen gefahrlos über der Kleidung anwenden.

